

Notice : BOUCHON SONIC II

Fonction

Coussin en gomme de silicone extra-douce, pour un meilleur confort.

- La valve mécanique permet à l'utilisateur d'entendre une Conversation normale, tout en le protégeant des sons violents.
- Evite l'effet d'isolation totale.
- Taux de réduction de bruit d'environ 6 décibels (dans des conditions normales d'utilisation).

Utilisation

Enfoncer en tournant la plus petite extrémité dans le canal de l'oreille, jusqu'à obtenir une bonne isolation.

Otez le cylindre métallique du coussin avant nettoyage (eau chaude savonneuse ou alcool). Utilisez de l'eau bouillante pour stérilisation.

